

# Protocol reiniging stemprothese

In deze instructie leggen we stap voor stap uit hoe u uw stemprothese op de juiste manier reinigt en onderhoudt. Tevens komen de benodigde producten aan de orde.

## 1. De reiniging per type stemprothese

Bijna alle stemprothesen worden op dezelfde wijze gereinigd met een “Laryvox® DuoBrush” stemprotheseborstel en een “Flushing device”. Uitzondering daarop is de Blom Singer DualValve stemprothese. Deze heeft twee kleppen die bij reiniging met een borstel kunnen worden beschadigd. Wij adviseren deze stemprothesen te spoelen met de “Flushing device”.



## 2. De gebruikte hulpmiddelen


- **Laryvox® Duo Brush (REF 29110)**  
De Laryvox Duo brush is verkrijgbaar in verschillende lengtematen, passend bij uw stemprothese.
- **Laryvox® Stomalampje (REF 69101)**  
Het lampje kan met het bijgeleverde beugeltje op de borstel worden bevestigd.
- **Fahl Stemprothese Flushing Device (REF IN4050)**



**Belangrijk:** Raadpleeg voor het eerste gebruik altijd de handleiding van het product voor het juiste gebruik.

## 3. De reiniging van de prothese


- Reinig uw stemprothese in de ochtend en avond en bij voorkeur na elke maaltijd.
- Plaats het stomalampje op de **DuoBrush** met behulp van het bijgeleverde beugeltje.
- Bevochtig de borstelkant van de DuoBrush met water en schuif de borstel recht in de stemprothese.
- Reinig de stemprothese door de borstel iets voor- en achterwaarts te bewegen en tegelijkertijd te draaien.
- Spoel de stemprothese na met de **Flushing Device**. (Of als u een DualValve stemprothese draagt: reinig op deze wijze de prothese).
- Vul hiervoor de Flushing Device met schoon water of Natriumchloride (NaCl).
- Plaats de punt zorgvuldig in de opening van de stemprothese. Let op dat u niet in de ballon knijpt voordat de Flushing Device goed is geplaatst (het vrijkomende water komt dan in de luchtpijp en kan een hoestreactie veroorzaken). Knijp in de ballon om een straaltje water door de prothese te spuiten.

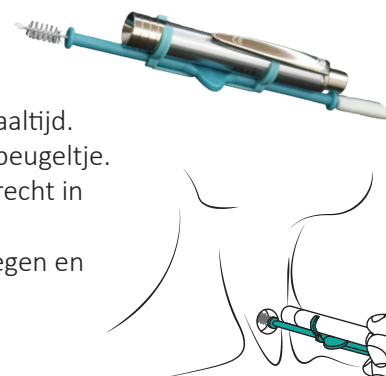

**Tip:** Als het water niet makkelijk in de prothese kan worden gespoten is deze mogelijk verstopt door gedroogd slijm. Wacht een paar minuten. Het reeds ingespoten water zal de gedroogde resten losweken. Spoel daarna opnieuw.

- U kunt de Flushing Device ook zonder water gebruiken, dan blaast u de stemprothese schoon. De losgeborstelde deeltjes worden zo verwijderd.

- Aan de achterkant van de borstel zit een “swab”. Hiermee kunt u de uitwendige delen van de stemprothese reinigen. De swab **niet in** de stemprothese gebruiken.
- Reinig de borstel na elk gebruik met water en een druppel afwasmiddel.
- Spoel de DuoBrush daarna goed schoon.
- Desinfecteer de DuoBrush en de Flushing Device volgens de aanwijzingen in de handleiding.
- Vervang de borstel eens per week. Vervang de borstel altijd direct als deze slijtage vertoont.

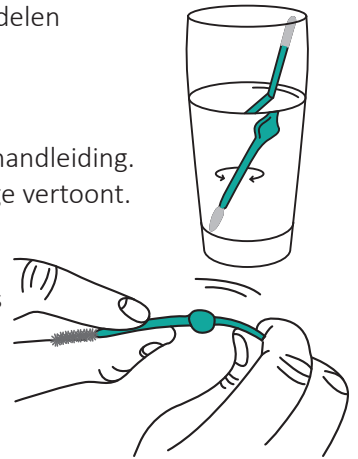

**Tip:** Om de stemprothese beter te kunnen bereiken kunt u de DuoBrush buigen. Buig altijd het groene plastic gedeelte van de borstel. Dit gaat makkelijker als u de steel van de borstel verwarmt onder de warme kraan. Buig **NOOIT** de metalen borstelkern. Deze kan hierdoor beschadigen.

### Advies of hulp nodig?

Ondervindt u problemen met het reinigen van uw stemprothese? Wij helpen u graag met nadere uitleg of tips, ongeacht het merk stemprothese dat u draagt.

Neem contact op met onze Customer Care per e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek van een van onze productdeskundigen voor uitleg bij u thuis. We kunnen dan een beter en persoonlijk advies geven.

### Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Bel dan met uw contactpersoon van MDS of neem contact op met onze Customer Care via telefoonnummer **050-569 0038**. U kunt ons ook per e-mail bereiken op: **info@mdsbv.com**

| Bestelgegevens genoemde producten |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Art. nr.                          | Omschrijving                      | Eenheid                         |
| 29110-06                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 6 (6 mm)   | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-08                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 8 (8 mm)   | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-10                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 10 (10 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-12                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 12 (12 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-18                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 18 (18 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 69101                             | LARYVOX STOMALAMP                 | Per stuk                        |
| IN405                             | FAHL STEMPROTHESE FLUSHING DEVICE | Doosje 3 stuks                  |
| 3570310                           | NatriumChloride 0,9%              | Verpakking 20 flacons van 30 ml |